

Formulier bloedafname

Patiëntensticker:

Afname datum:

Afname tijd:

Gelieve 2 buizen bloed af te nemen:

- **6 ml EDTA buis**
- **6 ml Serum buis**

1. Label elke buis met **PACYFIC sticker**

2. Voorzien sticker van lokaal patiënten nummer of studienummer (niet beide)

3. Invriezen < 6 uur;*

- **EDTA -20** graden Celsius
- **Serum -80** graden Celsius

Contact

Naam:

Telefoon:

Email:

Website: www.pacyfic.net

* Stuur beide buizen naar de PACYFIC biomateriaal opslag locatie in uw centrum.